

## VIRO - PRELEVEMENTS CUTANES OU MUQUEUX POUR HSV OU VZV

Applicable au 09/03/2018

Approuvé par S. FAFI-KREMER, responsable de service le 09/03/2018

Validé par M. SOLIS, biologiste

Rédigé par Wallys KACK-KACK

Processus de rattachement : Pré-analytique

### A. MATERIEL

Selon le type de prélèvement :

- Ecouvillon Copan UTM ou Virocult
- Seringue stérile (type insuline) et tube stérile

### B. PREPARATION DU PATIENT

Sans objet

### C. MODE OPERATOIRE DU PRELEVEMENT

#### ➤ Frottis de peau (lésions), ulcérations, vésicules

Prélever à l'écouvillon à la base et en périphérie de l'ulcération ou écouvillonner le plancher de la vésicule. Après prélèvement, insérer l'écouvillon dans le tube stérile contenant le milieu de transport. Agiter l'écouvillon dans le milieu et bien refermer le tube (laisser éventuellement l'extrémité de l'écouvillon dans le tube).

#### ➤ Liquide de vésicules

Prélever à la seringue stérile (type insuline), mettre la seringue dans un tube stérile après avoir enlevé l'aiguille.

#### ➤ Sphère génitale

Ecouvillonnage appuyé des lésions, placer l'écouvillon dans le milieu de transport.

